



NUANCE®

*Giulietta*

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**



**ESTE PRODUTO É  
DESENVOLVIDO E FABRICADO INTEIRAMENTE NO BRASIL**





# ATENÇÃO



12v

O adaptador AC/DC foi desenvolvido para uso **EXCLUSIVO** na **Wire Power**, sendo **PROIBIDA** a sua utilização em qualquer outro aparelho.

A sua utilização em outros aparelhos eletrônicos irá ocasionar a queima dos mesmos.



## SUMÁRIO

<b>1. Nota de Segurança</b>	05
<b>2. Acessórios</b>	05
<b>3. Apresentação</b>	06
<b>4. Identificação</b>	06
<b>5. Dados Técnicos</b>	07
<b>6. Alimentação</b>	08
<b>7. Acessórios</b>	09
<b>8. Indicações de uso</b>	09
<b>9. Preparando seu dermógrafo para utilização</b>	09
<b>10. Mapeamento do Teclado de Comando</b>	11
<b>11. Ligando a Fonte</b>	11
<b>12. Operando a Fonte Wire Power</b>	12
<b>13. Pareamento e Despareamento com Pedal Wireless</b>	14
<b>14. Restauração de senha</b>	15
<b>15. Funções Extras ao Utilizar o App NUANCE</b>	15
<b>16. Precauções e Segurança</b>	16
<b>17. Garantia</b>	17
<b>18. Aplicativo Nuance</b>	20
<b>18.1 Como obter o app</b>	20
<b>18.2 Primeiros passos</b>	20
<b>19. Tela Inicial do App</b>	21
<b>19.1 Menu Lateral</b>	22
<b>20. Conectando a um dispositivo</b>	23
<b>21. Tela e funções Wire Power</b>	24
<b>21.2 Menu suspenso</b>	25
<b>21.3 Comando de voz</b>	25
<b>21.4 Indicador principal</b>	27
<b>21.5 Indicador secundário</b>	28
<b>21.6 Teclas para ajuste</b>	28
<b>21.7 Tecla de memória</b>	28
<b>21.8 Tecla modo pedal</b>	29
<b>21.9 Botão liga e desliga</b>	29

## NOTA DE SEGURANÇA

- Leia atentamente as informações deste Manual de Instruções antes de utilizar o produto.
- Nunca utilize o equipamento em condições anormais (atmosferas explosivas, gases inflamáveis, fumaça, vapor ou poeira), quebrados ou com o equipamento aberto.
- Caso o equipamento seja usado de maneira não especificada pelo fabricante, sua proteção pode ser prejudicada.
- Não coloque objetos sobre este produto, principalmente contendo líquidos.
- Remova, caso conectado, o cabo de alimentação. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou aerossóis. Utilize apenas um pano úmido para a limpeza.
- Para reduzir riscos, nunca desmonte o produto. Abrir ou remover partes do produto pode expô-lo a choques elétricos ou outros riscos. A remontagem incorreta poderá causar choques elétricos quando o produto for utilizado posteriormente.

## ACESSÓRIOS

Verifique se os seguintes itens estão em falta ou com danos:


1. Guia Rápido
2. Demógrafo com Fonte Wire Power
3. Adaptador AC/DC

No caso de componente danificado ou ausente, entre em contato imediatamente com o SAC NUANCE.

## APRESENTAÇÃO

O Demógrafo Giuletta é um equipamento completo e moderno que facilita qualquer uma das técnicas de micropigmentação com toda a delicadeza e precisão. Feito para acompanhar os profissionais com a sua versatilidade. Ouse ir além, explore todas as possibilidades com Giuletta!

## IDENTIFICAÇÃO

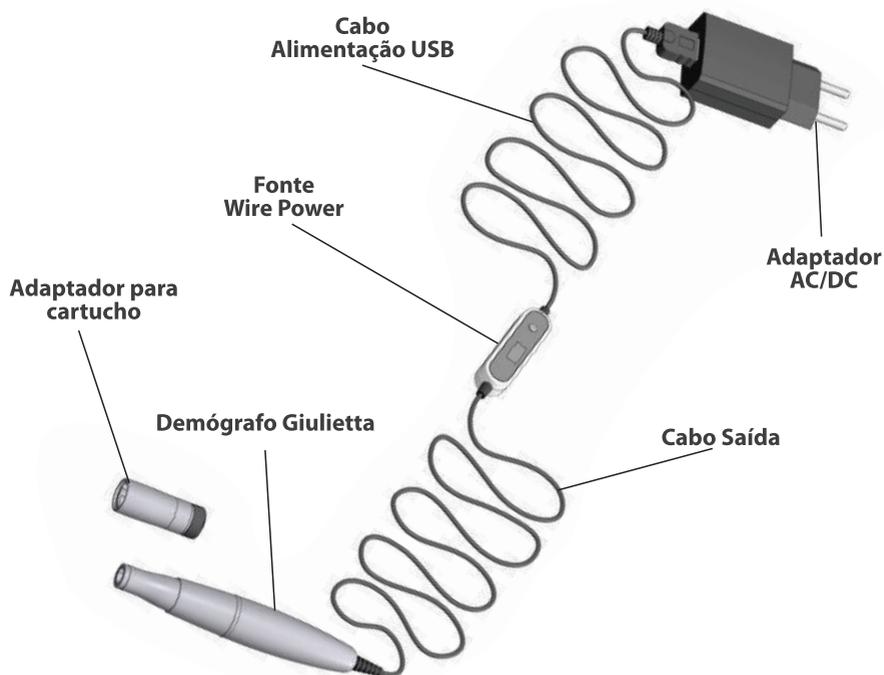

## DADOS TÉCNICOS

- REGISTRO ANVISA: 80485730005

### -CANETA

Motor	Motor de Precisão DC
Tensão Nominal	4 à 8 VDC
Consumo Máximo	1,4 W
Conexão Elétrica	USB-A
Frequência de Perfuração	60 a 110 PPS
Curso	2,2 mm
Avanço	4,0 mm
Comprimento x Diâmetro	128 x 21 mm
Peso da Caneta	70g
Material da Caneta	Alumínio

### -FONTE

- MODELO: EI-WP-MIC1:
- Alimentação: 12Vdc
- Saída Volts: 5 à 8V
- Resolução: 5 PPS
- Saída Amperes: 1A
- Proteção contra curto-circuito na saída: Sim
- Display: OLED
- Conectividade: Bluetooth 5.3
- Peso da Fonte: 30 gramas
- Material da Fonte: Gabinete injetado, cabos trançados em nylon ultra resistente.

- Cabo Alimentação: Comprimento: 2 metros ( $\pm$  5 centímetros de variação), Diâmetro: 2mm, Conexão: USB-A.
- Cabo Saída: Comprimento: 1.2 metro ( $\pm$  5 centímetros de variação), Diâmetro: 2mm, Conexão: Ligada diretamente à Caneta.

#### **-ADAPTADOR AC/DC:**

- Alimentação: 100 a 240VCA, 50/60Hz, 0.4A
- Saída: 12V, 1A, 12W máx., USB-A.
- Proteção contra curto-circuito na saída: Sim
- Tipo de Plug: EU Standard
- Certificação internacional CE: Sim

## ALIMENTAÇÃO

- A fonte Wire Power é alimentada por adaptador AC/DC externo que acompanha o produto;
- Entrada:100-240V-50/60Hz 0.4A Saída: 12VCC | 1.0A 12W

**Observação: Wire Power somente funcionará com os adaptadores fornecidos pela NUANCE, pois a sua saída é de 12V com corrente limitada.**

## ACESSÓRIOS

Os acessórios necessários para utilização da Giulietta podem ser adquiridos separadamente através do site [www.pigmentosnuance.com.br](http://www.pigmentosnuance.com.br)

- Adaptadores de cartucho
- Cartuchos Descartáveis
- Tintas para Micropigmentação Nuance
- Batoques InkCaps
- Protetor Plástico de Proteção da Máquina
- Protetor Plástico de Proteção do Cabo

## INDICAÇÕES DE USO

Uso indicado somente por Micropigmentadores profissionais.

- Manuseio do equipamento.
- Curso básico de higiene e segurança.
- Profundidade da penetração da agulha na pele.
- Aplicação do pigmento na pele.
- Conhecimento sobre cicatrização da pele após o procedimento.

## PREPARANDO SEU DERMÓGRAFO PARA UTILIZAÇÃO

- Consulte as instruções de uso da Fonte Wire Power Nuance contidas neste manual.
- Coloque luvas descartáveis.

- Todos os Adaptadores do Dermógrafo Julietta possuem seu respectivo número gravado na parte inferior. Para ou retirada para limpeza ou troca do Adaptador basta segurar o corpo do Dermógrafo e girar o Adaptador no sentido anti-horário.



- Para conectar o Adaptador ao Dermógrafo, segure o corpo do Dermógrafo, pressione o adaptador contra o mesmo e gire-o no sentido horário.




- Cubra seu Dermógrafo Julietta e sua Fonte Wire Power Nuance com plástico descartável adequado de proteção contra contaminação.
- Conecte o cartucho na ponta do Adaptador e gire no sentido horário.



- ⚠ Utilize apenas o cartucho correspondente ao Adaptador conectado ao seu equipamento.
- ⚠ A forma de encaixe do cartucho irá variar conforme modelos de Adaptador e cartucho utilizados.
- ⚠ Risco de perfuração ao manusear o cartucho.

- Verifique se o cartucho está encaixado corretamente.
- Para retirar o cartucho, gire-o no sentido anti-horário.
- Ligue a fonte de alimentação e regule-a conforme indicado neste manual.
- Separe todos os outros materiais que serão utilizados (tintas, batoques, etc) e organize a bancada. Troque as luvas descartáveis e inicie o procedimento.

## MAPEAMENTO DO TECLADO DE COMANDO

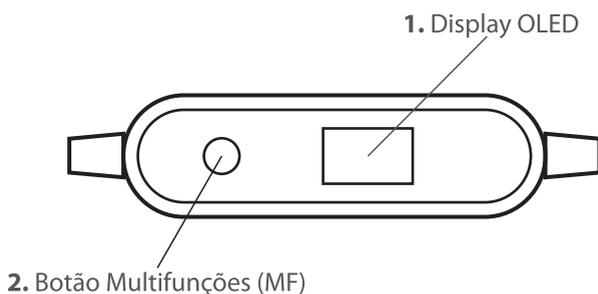

## LIGANDO A FONTE

- Com adaptador AC/DC desconectado da tomada, conecte a fonte Wire Power ao adaptador AC/DC através do cabo de alimentação USB (fig 3);
- Conecte adaptador AC/DC a uma tomada com tensão entre 100 à 240Vac a seleção da tensão do adaptador será feita automaticamente (fig 4);

- Sua fonte virá em modo stand by, exibindo logo da NUANCE e em modo soneca, para ativar sua fonte basta dar um click no botão Multifunções e o display apresentará a logo de inicialização, indicando que sua fonte já está pronta para uso.

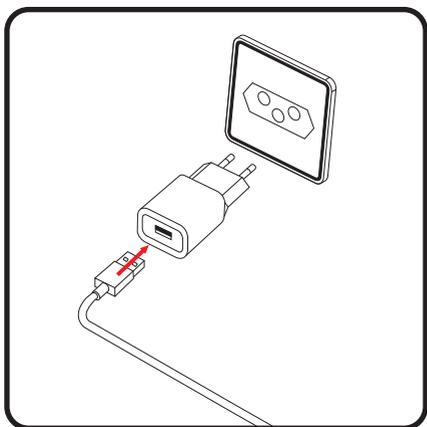


Fig3: Conectando plug USB ao adaptador AC/DC.

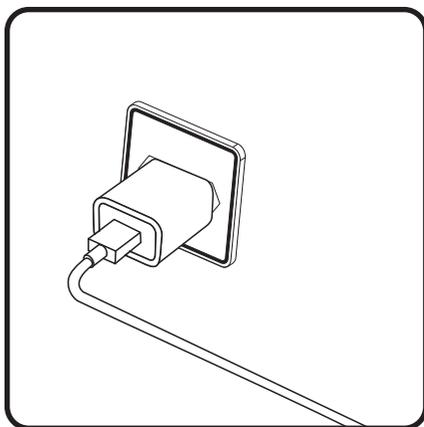



Fig4: Conectando adaptador AC/DC a uma tomada.

## OPERANDO A FONTE WIRE POWER

- A fonte Wire Power possui apenas um botão com Multifunções, onde todas as funções básicas poderão ser comandadas por este.
- Para comandos mais avançados, basta utilizar o APP através de um Smartphone com sistema operacional IOS ou Android.


### Play / Pause

- Para executar Play/Pause da máquina, basta dar um click no botão Multifunções, a cada click o estado entre Play e Pause será alternado.

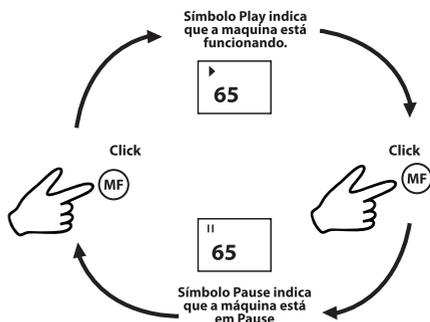

## Aumentar/Diminuir PPS

- Para aumentar ou diminuir os PPS, pressione o botão Multifunções e mantenha pressionado por aproximadamente 2 segundos, após esse tempo o display exibirá em abaixo do número uma linha crescente da esquerda para a direita indicando que esse valor poderá ser aumentado ou uma linha decrescente da esquerda para a direita indicando que esse valor poderá ser diminuído.
- Enquanto a linha estiver sendo exibida, basta clicar no botão Multifunções para aumentar ou diminuir o valor do PPS.
- Os valores do PPS estão presetados entre 60 a 110 PPS com degraus de 5 PPS.
- Para sair modo de ajuste de PPS, basta pressionar o botão Multifunções em manter pressionado por aproximadamente 2 segundos ou isso ocorrerá automaticamente após 5 segundos se não houver nenhum clique.

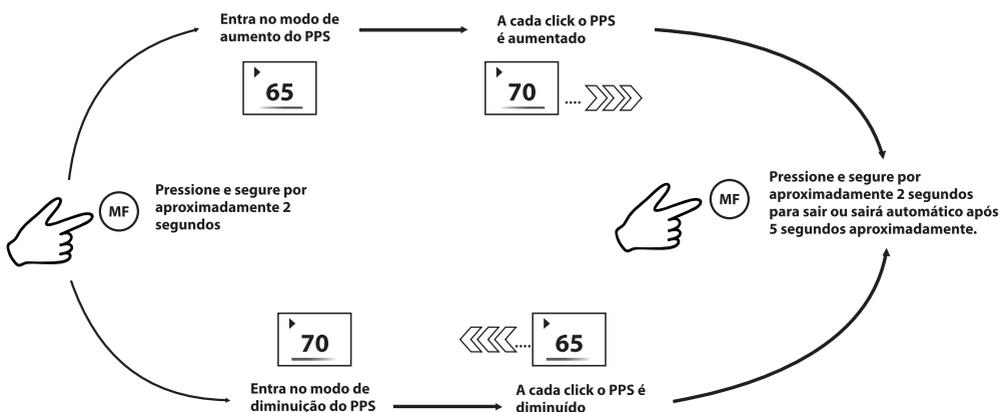


## Stand By.

- Sua fonte entrará no modo stand by automaticamente após 5 minutos de inoperância, para reativá-la basta dar um clique no botão Multifunções e o display apresentará a logo de inicialização indicando que sua fonte já está pronta para uso.

## PAREAMENTO E DESPAREAMENTO COM PEDAL WIRELESS

**Atenção:** Atenção: A Fonte Wire Power conectará somente o Pedal Wireless modelo EI-WFT1.


Para habilitar a comunicação da Wire Power com Pedal Wireless, pressione botão Multifunções por aproximadamente 5 segundos ou até que apareça no canto superior direito do display uma pequena letra que pode ser (A, P ou T) indicando que sua Wire Power está pronta para conectar ao Pedal Wireless.

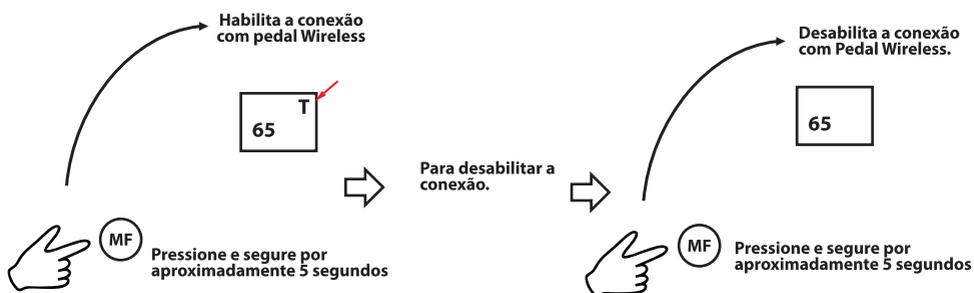


Letra	Significado	Descrição da função
A	Automático	Utiliza-se de inteligência artificial para detectar modo mais confortável de acionamento da máquina, podendo trabalhar em Pulso ou Trava.
P	Pulso	Enquanto o pedal estiver pressionado a máquina estará em Play ao solta-lo a máquina voltará para pause.
T	Trava	Toda vez que o pedal for pressionado o estado da máquina alterna entre Play e Pause.

**Observação:** A alteração destas letras somente é possível através do APP. Consulte o Manual do App.


## RESTAURAÇÃO DE SENHA

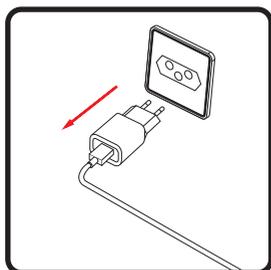

1º.: Retire o adaptador AC/DC da tomada.

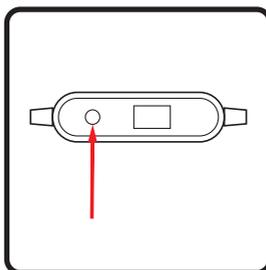

2º.: Pressione e mantenha pressionado o botão.

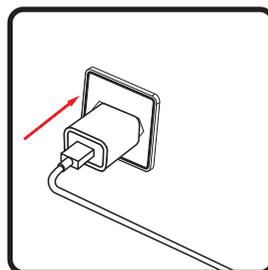

3º.: Ainda com o botão pressionado, insira o adaptador AC/DC na tomada.

OBS: Se o display exibir a mensagem “Restaurada” indicando que a restauração da senha foi bem-sucedida, a senha de conexão com o smartphone estará alterada para 123456.

## FUNÇÕES EXTRAS AO UTILIZAR O APP

Através do “**APP NUANCE**” é possível acessar as funções extras da fonte Wire Power, esse é gratuito e pode ser instalado em seu smartphone com sistema operacional IOS ou Android.

Baixe e instale o app utilizando Play Store ou Apple Store, para encontrá-lo busque pelo nome **NUANCE**.

Após instalação abra o **APP**, habilite o Bluetooth e a Localização, esses recursos são obrigatórios para a utilização de dispositivos Bluetooth com baixo consumo de energia.

Pelo “APP” as seguintes funcionalidades estarão disponíveis:

**1.** Atualização do software;

2. Memorização dos PPS;
3. Controle de PPS;
4. Personalização dos PPS;
5. Play Pause;
6. Habilita e desabilita conexão com Pedal Wireless;
7. Altera os modos de funcionamento do Pedal Wireless;
8. Restauração de fábrica.

**Observação:** Recorra ao manual embutido no APP para mais detalhes.

## PRECAUÇÕES E SEGURANÇA

Esse dispositivo é um produto eletrônico:

- Teme água.
- Queda.
- Necessita de descarte adequado quando for inutilizado.
- Condições de Armazenamento: TEMPERATURA AMBIENTE (+8 até +35°C)
- Em caso de exposição em altas temperaturas, não ligue seu Dermógrafo pois pode danificar o motor. Aguarde o resfriamento até a temperatura ambiente.
- Jamais mergulhe seu Dermógrafo em líquidos desinfetantes.
- Nunca tente retirar a tampa e nem desconectar a proteção do motor. Pois pode ocasionar perda de peças pequenas, molas, arruelas e ainda causar deslocamento do motor.
- Antes do procedimento, cubra seu Dermógrafo com plástico descartável adequado.
- Não dobre ou corte os cabos.
- Mantenha seu Dermógrafo sempre limpo e livre de resíduos.

## GARANTIA

Os produtos fabricados pela **NUANCE**, são testados em um processo de Controle de Qualidade que garante aos usuários confiança e tranquilidade na execução de seus trabalhos.

A **NUANCE** assegura a seus produtos, na forma da legislação vigente, garantia sobre o produto (mediante apresentação de Nota Fiscal de compra), contra defeito de fabricação que o mesmo venha a apresentar no prazo de:

- 90 (noventa) dias de Garantia Legal, a contar da data de emissão da Nota Fiscal. A garantia para produtos comercializados por revendedores inicia-se a partir da emissão da Nota Fiscal / Venda ao cliente final. (Exija sua nota Fiscal).

A **NUANCE** garante ao consumidor o envio e reenvio dos produtos para assistência técnica, dentro do prazo da garantia legal, ou seja, 90 (noventa) dias, após esse prazo, o envio e reenvio é por conta do cliente.

A garantia **NUANCE** contra defeitos de fabricação passa a contar a partir da aquisição do produto pelo consumidor, comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal de compra do respectivo item.

Para efeitos de garantia, o produto deverá ser encaminhado para o Suporte Técnico da **NUANCE** acompanhado da Nota Fiscal e os itens que acompanham a máquina, no qual será submetido a análise.

Durante a vigência da garantia, estará incluso a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços a serem executados pelo Suporte Técnico **NUANCE**, quando constatado defeito de fabricação do item.

Caso o produto não esteja mais disponível no portfólio da empresa e apresente defeito dentro do prazo de garantia, serão tomadas as seguintes providências:

- a) Substituição por outro produto com a mesma função dentro do prazo de 90 dias;
- b) Abatimento do valor se o defeito não inviabilizar a utilização do produto.

A medida a ser tomada vai depender de cada caso e a critério da **NUANCE**.

Nenhuma outra garantia, de qualquer tipo, seja expressa, tácita ou implícita, poderá ser oferecida por revendedores.

## RESTRIÇÕES DA GARANTIA

A garantia **NUANCE** contra defeitos de fabricação perderá a sua validade nas seguintes situações:

- Uso inadequado ou em desacordo com o manual de instruções do respectivo produto ou acessório;
- Utilização do produto em ambientes sujeitos a umidade excessiva, temperatura de operação fora dos limites especificados no manual de instruções do respectivo produto ou acessório;
- Danos causados por acidentes e quedas;
- Danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequada, utilizados pelo cliente;
- Apresentação de sinais de violação, ajuste, conserto ou modificação por pessoa não autorizada pela **NUANCE**;
- Defeitos e danos causados pelo uso de acessórios não compatíveis com as especificações dos produtos **NUANCE**;
- Produtos que tenham seu número de série removidos, adulterados ou tornados ilegíveis;
- Desgaste natural das peças;

No caso de perda de garantia por um dos motivos citados neste Termo, o reparo do produto estará sujeito a orçamento prévio. Também será considerada nula a garantia se a Nota Fiscal de compra apresentar rasuras ou modificações;


A **NUANCE** assegura a todos os produtos fabricados pela marca, o prazo de 30 dias, contados a partir da entrega do produto na assistência técnica, para efetuar o reparo/conserto do produto.

**SEMPRE avalie os produtos e os itens que o acompanham no ato da entrega. Qualquer anormalidade deverá ser comunicada IMEDIATAMENTE à NUANCE.**

## APLICATIVO NUANCE

### 18.1 COMO OBTER O APP

O app é gratuito para realizar o download, e está disponível na Google Play Store e Apple Store. Para instalá-lo é recomendado um smartphone com Android 8.0 ou superior, ou iPhone com IOS 13.0 ou superior. Para encontrá-lo em qualquer uma das lojas de app, basta procurar por Nuance, o ícone e nome são os seguintes:

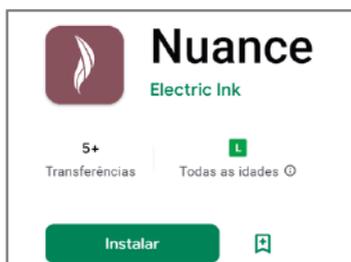


### 18.2 PRIMEIROS PASSOS

Com o APP NUANCE instalado, você deve habilitar os serviços Bluetooth e Localização do seu smartphone, para encontrar e conectar aos dispositivos Nuance mais próximos é obrigatório habilitar esses dois serviços, feito isso, abra o app.

## TELA INICIAL DO APP

Na tela inicial, caso tenha algum dispositivo da linha CONECTIVIDADE NUANCE próximo ele será exibido na lista que é ordenada pela proximidade ao seu smartphone, caso possua vários dispositivos com mesmo nome procure deixar o dispositivo ao qual você quer conectar o mais próximo possível do seu celular e reinicie o scan de dispositivos, assim ele será o primeiro da lista.

1. Botão de Iniciar e Parar a procura de dispositivos. A lista é ordenada por proximidade dos dispositivos ao smartphone, e toda vez que a busca é iniciada essa lista é limpa.
2. Botão de Conectar com dispositivos Nuance.
3. Lista de dispositivos, ordenada por proximidade ao smartphone.
4. Botão de menu lateral, que exibe funções extras do App.

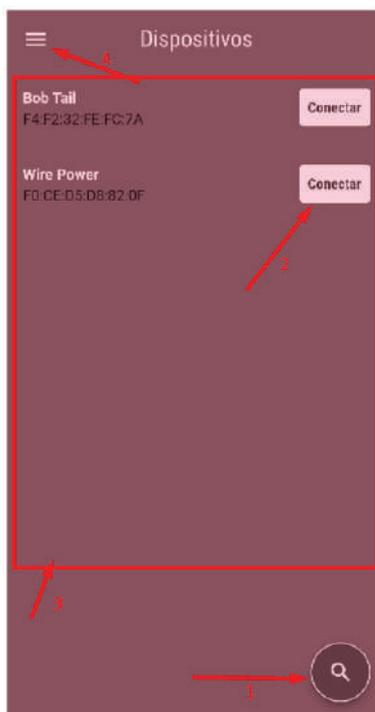

## 19.1 MENU LATERAL

**Configurações:** Nessa opção é possível redefinir a paleta de cores do app personalizando o app de acordo com suas cores. Também nessa opção é possível selecionar o idioma em que o app funcionará.

**Manuais:** Nessa opção é possível visualizar os manuais de todos os dispositivos Nuance que possuem conectividade com o App.



## CONECTANDO A UM DISPOSITIVO


Na tela inicial clique no botão Conectar caso for sua primeira conexão será solicitado a senha, por padrão a senha de fábrica é 123456, se a senha foi alterada e você precisa recuperá-la, siga o manual de instrução do seu dispositivo para recuperar a senha de fábrica.

Caso você já tenha conectado a esse dispositivo, basta clicar sobre o botão Reconectar que a conexão será feita sem a solicitação de senha.



## TELA E FUNÇÕES WIRE POWER

1. Menu suspenso
2. Botão do comando de voz
3. Indicador Principal
4. Indicador Secundário
5. Teclas de ajustes
6. Tecla de memória
7. Tecla do modo Pedal
8. Tecla Liga e Desliga

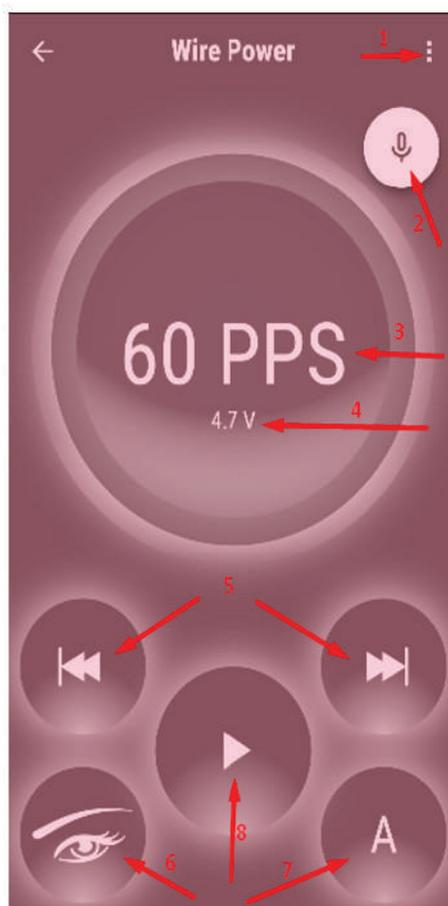

## 21.1 MENU SUSPENSO

Exibe as seguintes funções:

**Desparear:** Serve para desvincular e desconectar o dispositivo Nuance do celular, quando for se realizar uma nova conexão com esse dispositivo será solicitado a senha novamente como se fosse a primeira conexão.

**Apelidar Dispositivo:** Permite a criação de um apelido para que o seu smartphone exibe esse nome na lista de dispositivos, tornando mais fácil identificar qual é o seu dispositivo na hora de conectar.

**Informações:** Exibe informações do seu dispositivo como nome, apelido, versão do software e tempo de máquina em funcionamento.

**Alterar Senha:** Possibilita a troca da senha de conexão com seu dispositivo.

**Atualizar Dispositivo:** Deixa o dispositivo Nuance atualizado com o software mais novo que está no mercado.

**Restaurar de Fábrica:** Retorna o seu dispositivo aos parâmetros de fábrica.

## 21.2 COMANDO DE VOZ

Após habilitar a função comando de voz no menu do velocímetro, um botão com o símbolo de microfone aparecerá no canto superior esquerdo, esse botão é móvel e você pode posicioná-lo na tela onde for mais confortável.

Com essa função habilitada, o botão de play/pause da sua fonte e o seu pedal Bob Tail, passam a servir para acionar a escuta do comando de voz, não ligando e desligando mais a máquina conforme a função normal. Para que o botão de play/pause da sua fonte ou seu pedal Bob Tail voltem a acionar a máquina e não o comando de voz, basta desligar a função ou fechar o App.

Os comandos e ações que estão disponíveis, são descritos na tabela a seguir:

<b>WIRE POWER NUANCE</b>	
<b>COMANDOS</b>	<b>AÇÃO</b>
- Ligar	Liga máquina
- Desligar	Desliga máquina
- Trocar unidade	Troca unidade de trabalho
- Aumentar para (valor desejado) - Diminuir para (valor desejado) - Tensão para (valor desejado) - (valor desejado) Volts	Altera valor de tensão
- Aumentar para (valor desejado) - Diminuir para (valor desejado) - Pps para (valor desejado) - (valor desejado) Pps	Altera valor de pps
- Pedal modo pulso - Pedal modo trava - Pedal modo automático - Desligar pedal - Desconectar pedal	Altera valor de pps
- Ativar memória lábio - Ativar memória lábios  - Ativar memória cabelo - Ativar memória capilar  - Ativar memória areola - Ativar memória mama  - Ativar memória sobrancelha - Ativar memória olho - Ativar memória olhos	Carrega valor armazenado na memória

DICA1: Quanto mais silencioso o ambiente e mais próximo ao smartphone, melhor será a acertividade do app ao interpretar seu comando.

DICA 2: O comando deve ser dito pausadamente e de forma clara para que o APP entenda melhor o comando.


DICA 3: Para ajustar valores de tensão (volts) sempre diga o número antes e após a vírgula mesmo que seja um número inteiro. Por exemplo para ajustar a tensão para 6 volts diga o comando "seis ponto zero volts".

### 21.3 INDICADOR PRINCIPAL

Exibe o valor de saída Tensão ou Pulsos Por Segundo na máquina de acordo com a unidade escolhida, clicando sobre o “Indicador Principal” aparecerá o seguinte menu:

**Unidade:** Serve para se alterar a unidade de trabalho da sua Power 1 entre Volt e Pps.

**Comando de voz:** Serve para habilitar ou desabilitar o comando de voz.

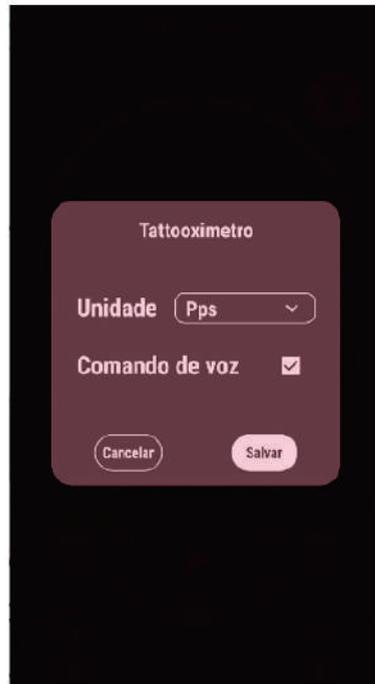

## 21.4 INDICADOR SECUNDÁRIO

Exibe o valor atual na unidade secundária, possibilitando realizar um comparativo entre os valores de acordo com as unidades.

## 21.5 TECLAS PARA AJUSTE

Ajusta os valores das grandezas: Tensão ou Pontos Por Segundo, selecionada no “Indicador Principal”, possibilitando aumentar ou diminuir, o valor atual, clicando sobre um dos botões.

## 21.6 TECLA DE MEMÓRIA

Permite armazenar ou carregar valores ajustados em cada unidade. Cada memória é independente para Pps ou Voltz, sendo possível armazenar uma memória com símbolo porém com valores diferentes para Pps e Volts.

Para gravar o valor atual em uma memória, basta pressionar e manter pressionada a tecla da memória selecionada até que uma mensagem seja exibida.

Para selecionar uma memória já cadastrada pressione o botão de memória e arraste para cima, com isso uma lista com todas as memórias cadastradas será exibida.

## 21.7 TECLA MODO PEDAL

Permite alterar o modo de funcionamento do Pedal, caso esteja conectado a um pedal Nuance. Para abrir o menu pressione sobre a tecla e arraste para cima, então uma lista com as opções aparecerá, existem quatro opções:

**Modo Pulso:** É identificado pela letra “P” no display do seu dispositivo. Nesse modo enquanto o pedal estiver pressionado a máquina estará ligada, ao se despressionar o pedal a máquina desligará.

**Modo Trava:** É identificado pela letra “T” no display do seu dispositivo. Nesse modo sempre que pressionar o pedal o estado da máquina é alternado entre ligada e desligada.

**Modo Automático:** É identificado pela letra “A” no display do seu dispositivo. Nesse modo a fonte reconhece automaticamente qual o modo está sendo utilizado pelo atuador, seja ele trava ou pulso.

**Modo Desligado:** Nenhuma letra é exibida no display do seu dispositivo. E seu dispositivo não permitirá conexões com nenhum pedal.

## 21.8 TECLA LIGA E DESLIGA

Esse serve para ligar ou desligar a máquina (Play/Pause), basta dar um clique sobre o botão que o estado atual da máquina é alternado entre Play e Pause.



BELLE ARTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA  
Av. Cel. Zacarias Borges de Araújo, 1200 - Uberaba/MG  
CNPJ: 08.244.232/0001-05 | INDÚSTRIA BRASILEIRA  
[www.electricink.com.br](http://www.electricink.com.br)